

Les recommandations de nos techniciens pour l'entretien de votre matériel dentaire pendant cette période de COVID-19

Besoin d'aide ? N'hésitez pas à nous contacter



CIME
Dentaire

04 73 91 26 72

marco.malizia@groupecimedentaire.fr



DENTAL
Concept

04 79 84 24 71

contact@dentalconcept.fr



IRM Dentaire
Imagerie Radiologie Matériel

04 73 91 26 72

ludovic.lariviere@groupecimedentaire.fr

Période d'inactivité
(au moins 1 fois par semaine)

Juste avant la reprise d'activité



Pensez à fermer l'eau et à éteindre chaque appareil électrique un à un (ou débrancher la prise) quand vous quittez le cabinet.
Ne pas couper le disjoncteur général, certains postes informatiques doivent rester sous tension.

Ouvrir toutes les vannes d'eau et d'air fermées




Instruments dynamiques sur unité de soins

Afin d'éviter la création de biofilm dans les micro-tubulures

- Si vous possédez un système de désinfection type DVGW « OXYGENAL » ou IGN « CALBENIUM » suivez la procédure habituelle.
- Si non, purgez l'ensemble des instruments dynamiques l'un après l'autre (1 min/instruments). Lorsque le cycle est terminé, éteignez l'équipement et purgez la seringue Air et eau.

- Si vous possédez un système de désinfection type OXYGENAL ou CALBENIUM suivez la procédure habituelle
- Si non, purgez l'ensemble des instruments dynamiques l'un après l'autre. (1 min/instruments)

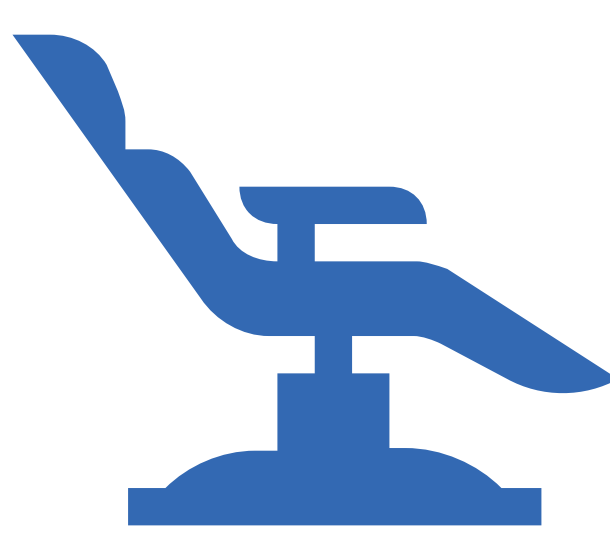

Aspiration chirurgicale au fauteuil

- Nettoyez les filtres des deux tuyaux d'aspiration, du crachoir, de la vanne crachoir. Les changer s'ils sont abîmés.
- Effectuer le nettoyage et désinfection avec vos produits habituels en suivant les recommandations des fabricants.
- Remplacer le bidon avec DEKASEPTOL par un bidon d'eau (KAVO E70 et E80) afin d'éviter la cristallisation des produits dans les micros tubulures.
- N'hésitez pas à faire tourner votre aspiration **quelques temps à vide afin de vider l'ensemble des conduites qui mène au moteur.**

- Procédez à une désinfection avec vos produits habituels en suivant les recommandations des fabricants.
- Réinstaller le bidon de DEKASEPTOL (KAVO E70 et E80)



Appareil de radio intra-oral

Faire une séquence de 3 expositions à vide (sans patient, sans capteur) dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1 exposition incisive enfant puis 1 exposition incisive adulte et enfin 1 exposition molaire adulte.

Attention, si la période d'arrêt prolongé est supérieure à 3 semaines sans acquisition, une procédure de redémarrage est indispensable, appelez votre technicien référent.
Si vous avez respecté les recommandations de maintenance hebdomadaire durant la période, ne pas tenir compte de la remarque ci-dessus :
- Faire une séquence de 3 expositions à vide (sans patient, sans capteur) dans l'ordre ci-dessous :
1 exposition incisive enfant puis 1 exposition incisive adulte et enfin 1 exposition molaire adulte



Autoclaves raccordés sur le réseau d'eau

- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.
- Faire un cycle Prion une fois par semaine afin d'éviter la création du biofilm au niveau des cartouches ou de l'osmoseur.


- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.
- Démarrer par un test de vide.
- Faire un cycle avec test HELIX ou bien cycle PRION avec intégrateur afin de vérifier la conformité de votre matériel.



Autoclaves avec réservoir

- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.
- Vider les réservoirs d'eau propre et d'eau sale.

- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.
- Remplir les réservoirs d'eau propre et mettre un produit de traitement de l'eau type Aqutab.
- Démarrer par un test de vide.
- Faire un cycle avec test HELIX ou bien cycle PRION avec intégrateur afin de vérifier la conformité de votre matériel.

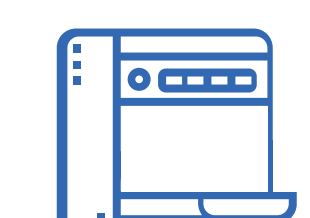

Thermo-laveurs:

- Nettoyage du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.
- Remplacer les bidons de produits avec des bidons contenant de l'eau.
- Faire un cycle rapide 1 fois par semaine.

- Nettoyage du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.
- Remplacer les bidons d'eau par les bidons contenant les produits.
- Faire un cycle normal.



SNC GAMASONIC

- Nettoyage de la cuve de l'automate.
- Remplacer les bidons de produits avec des bidons contenant de l'eau.
- Faire un cycle rapide 1 fois par semaine.

- Nettoyage de la cuve de l'automate.
- Remplacer les bidons d'eau par les bidons contenant les produits.
- Faire un cycle normal.



Appareil de désinfection des rotatifs

- Faire un cycle à vide 1 fois par semaine
- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l'eau déminéralisée.



Moteur d'aspiration chirurgical

- Nettoyage du filtre d'admission (DURR DENTAL : jaune).



Salle panoramique ou 3D

- Faire une séquence de 2 expositions à vide, dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1 panoramique enfant puis 1 panoramique adulte.

Attention, si la période d'arrêt prolongé est supérieure à 5 semaines sans acquisition, une procédure de redémarrage est indispensable, appelez votre technicien référent.
Si vous avez respecté les recommandations de maintenance hebdomadaire durant la période, ne pas tenir compte de la remarque ci-dessus :
- Faire une séquence de 2 expositions à vide, dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1 panoramique enfant puis 1 panoramique adulte



Ensemble des ordinateurs du cabinet

- Ne jamais éteindre le serveur
- Allumer les autres postes au moins une fois par semaine (pour les mises à jour).